

やさしい素肌タイプ

一般医療機器 34864000 救急絆創膏

カットバン®優

URETHANE BANDAGES

柔軟 + 快適

よく伸びるウレタン素材

水に強い

30
枚入
S
サイズ

高い通気性でムレにくい



やさしい素肌タイプ

カットバン®優

URETHANE BANDAGES

柔軟 + 快適

よく伸びるウレタン素材

水に強い

50
枚入
M
サイズ

高い通気性でムレにくい



やさしい素肌タイプ

カットバン®優

URETHANE BANDAGES

柔軟 + 快適

よく伸びるウレタン素材

水に強い

18
枚入
L
サイズ

高い通気性でムレにくい



やさしい素肌タイプ

カットバン®優

URETHANE BANDAGES

柔軟 + 快適

よく伸びるウレタン素材

水に強い

やさしい素肌タイプ
カットバン優
URETHANE BANDAGES

肌への優しさ，使いやすさにこだわった



S サイズ



M サイズ



L サイズ

3つの思いやり設計

1 どこでも



厚く丈夫な包装紙で、折れ曲がれに強く“どこでも”携帯しやすい

2 だれでも



つまみ部が広いので“だれでも”つまみやすい

3 清潔に



折り目つきで、パッドに触れず“清潔に”貼しやすい



ピタッとラインの使い方一例

こんな貼り方も…



● 折り目に沿って折りたたむことで、パッドに触れずに清潔に貼れます。

高い通気性で肌に優しい

通気性がありムレにくい支持体およびアクリル系粘着剤を使用しています。


〔透湿度試験〕

試験方法

透湿カップに水を入れ、製剤の粘着面を水側に向けてセットし、一定条件下(40℃, 50%RH)で自然蒸発する水蒸気を製剤を通して放出させ、その透過量から透湿度を算出する。

試験結果


カットバン優は自社従来品と比較すると透湿度が高かった。よって「カットバン優」は良好な通気性があり、自社従来品よりもムレにくい。

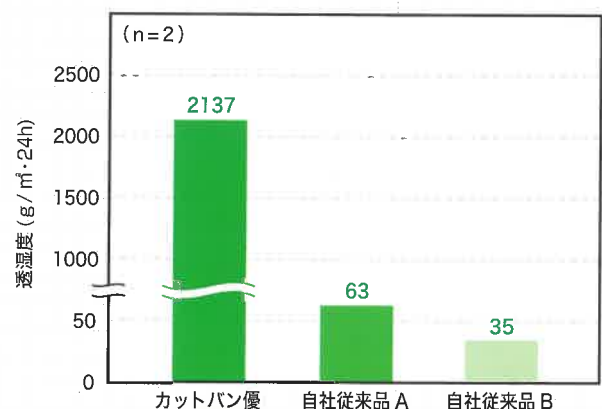

パッド周りの幅が広く水に強い


パッドの周りを広くすることでがれ・めくれを軽減し、水の浸入を防ぎます。

Sサイズ

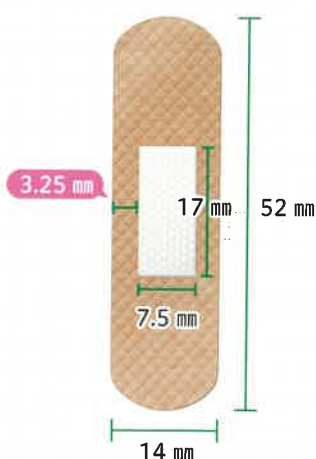


※実物大

Mサイズ

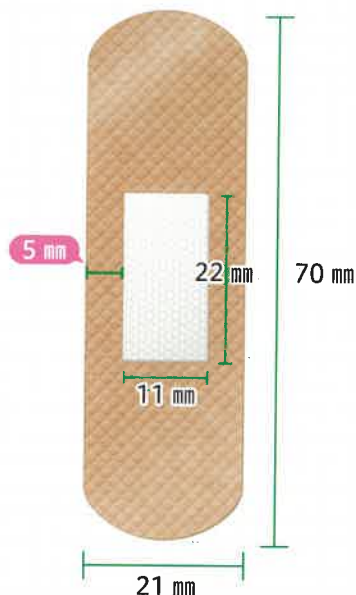

Lサイズ

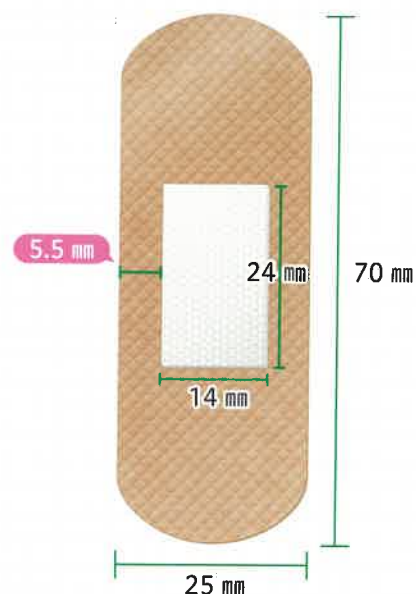

高い伸長性で快適な使用感

やわらかなウレタン不織布を使用し、快適な使いごちです。


(破断力試験)

試験方法

幅21mmの製剤の両端を引張試験機に固定し片方を毎分300mmの速度で引っ張り、製剤が破断するまでの伸び率および引張強度(引き伸ばすのに要した力)を測定する。

試験結果

カットバン優は自社従来品と比較すると低い引張強度で伸び率が高かった。よって「カットバン優」は自社従来品よりも柔軟性が高く軽い力でよく伸びる。

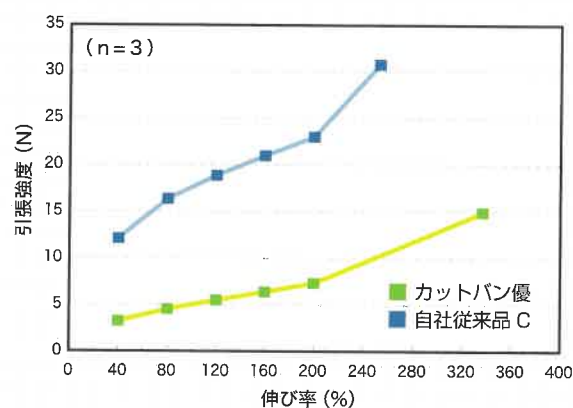

祐徳薬品工業株式会社内資料

柔軟によく伸びる!



日本製
MADE IN JAPAN

DRUG INFORMATION

名 称	カットバン優	届 出 番 号	41B2X00001000017
区 分	一般医療機器	一 般 的 名 称	救急絆創膏
JMDNコード	34864000	禁 忌 ・ 禁 止	再使用禁止
形 状 ・ 構 造 及 び 原 理 等	本品は、アクリル系粘着剤を塗布したポリウレタン不織布粘着テープとベンザルコニウム塩化物薬液で消毒したポリオレフィンネット付き不織布パッドからなる救急絆創膏です。		
使 用 目 的 又 は 効 果	創傷面の保護		
使 用 方 法 等	患部を清潔にして、パッドが患部にあたるようにはってください。		
使 用 上 の 注 意	1. 重要な基本的注意 本品の使用により発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。 2. その他の注意 1)パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、はり替えてください。 2)患部を清潔にし、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。 3)粘着面を患部にはらないでください。		
保 管 方 法 及 び 有 効 期 間 等	1. 保管方法 1)直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。 2)小児の手の届かない所に保管してください。 2. 有効期間 3年(自己認証による) 使用期限は外箱に記載		
包 装	Sサイズ:14mm×52mm(パッド7.5mm×17mm)30枚入 Mサイズ:21mm×70mm(パッド11mm×22mm)20枚,30枚,50枚入 Lサイズ:25mm×70mm(パッド14mm×24mm)18枚入		

品名	品番	規格	希望小売価格(本体価格)	JANコード/ITFコード	詰数	サイズ(幅×奥×高)・重量
カットバン優	CBY30S	S サイズ 30枚	480円		パッケージ	68×28×100mm・22g
				4 987235 023157	内装	10個 68×142×200mm・220g
				14987235023154	梱包	200個 425×365×305mm・5.0kg
	CBY20M	M サイズ 20枚	480円		パッケージ	68×18.5×100mm・23g
				4 987235 023164	内装	20個 68×188×200mm・460g
				14987235023161	梱包	400個 425×365×405mm・9.9kg
	CBY30M	M サイズ 30枚	600円		パッケージ	68×28×100mm・32g
				4 987235 023171	内装	10個 68×142×200mm・320g
				14987235023178	梱包	200個 425×365×305mm・7.0kg
	CBY50M	M サイズ 50枚	900円		パッケージ	68×35×100mm・48g
				4 987235 023188	内装	10個 68×177×200mm・480g
				14987235023185	梱包	200個 425×365×405mm・10.3kg
	CBY18L	L サイズ 18枚	480円		パッケージ	68×18.5×100mm・22g
				4 987235 023195	内装	20個 68×188×200mm・440g
				14987235023192	梱包	400個 425×365×405mm・9.5kg

製造販売元 祐徳薬品工業株式会社

お客様相談窓口
TEL.0954-63-1320
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

本 社：佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1 ☎0954(63)1231代
北 海 道 支 店：札幌市中央区北五条西六丁目2番2号札幌センタービル ☎011(233)0007代
東 北 支 店：仙台市青葉区本町二丁目15番1号ルナール仙台 ☎022(263)7277代
東 京 支 店：東京都大田区東糀台一丁目1番21号 ☎03(3745)6151代
名 古 屋 支 店：名古屋市東区葵一丁目26番14号シノダビル ☎052(856)3039代
大 阪 支 店：大阪府吹田市南吹田五丁目1番1号 ☎06(6380)1451代
中 四 国 支 店：広島市中区本通6番11号明治安田生命広島本通ビル ☎082(504)6060代
福 岡 支 店：福岡市博多区冷泉町5番32号オーシャン博多ビル ☎092(271)7701代

<http://www.yutokuyaku.co.jp/>

2019年6月作成
＜CBY-001K＞