

#2020 ハイブリッドグローブ ルピナス

LUPINUS

Compound of Plastic and Nitrile

加硫促進剤
フリー

ラテックス
フリー

パウダー
フリー

未滅菌



150 枚入

商品特長



プラスチック手袋に
ニトリル特有の伸縮性を追加しました



I 通常のプラスチック手袋



II ハイブリッドグローブピナス

- ▶ 伸縮性を向上させることで従来のプラスチック手袋より手にしっかりとフィットし、指先の細やかな作業を容易にします




手首から1枚ずつ取り出せて衛生的です



▶ 梱包方向

衛生的に利用することができます

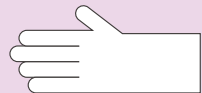

- ▶ Point1.
手首からの取り出しが可能です
- ▶ Point2.
中身が少なくなってきたら別の取り出し口から簡単に取り出すことができます

1 柔らかく手にぴったりフィット

特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近いフィット感や伸縮性があります。

2 ラテックス・加硫促進剤フリー

アレルギーの原因となるラテックスや加硫促進剤を使用しておりません。

3 手首取り出しで衛生的

手首からの取り出しが可能で、衛生的にご利用頂けます。


4 耐油性に優れている

天然ゴム製の手袋に比べて、油や洗剤に強く、劣化しにくい商品です。


商品情報

脱着手順

【手袋】【着け方】

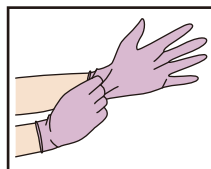


①親指の位置を確認し、手首の部分をつかんで装着する

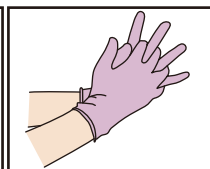


②指先部分をフィットさせる


【手袋】【外し方】

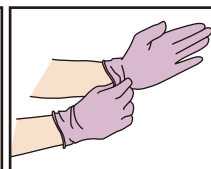


①片方の手袋の袖口をつかむ

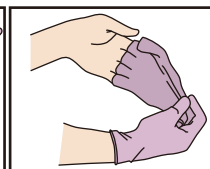


②表面が内側になるように裏返ししながら外す

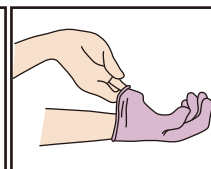

③手袋を外した手を反対の手袋の袖口に差し込む

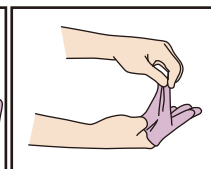

④裏返ししながら外す

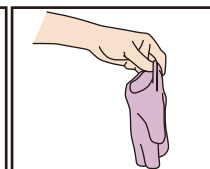

⑤すぐに破棄し、手指消毒を行う

商品規格

品番	品名	カラー	サイズ	ケース入数	JANコード	物性
#2020	ハイブリッドグローブピナス 粉無 150枚入	パープル	SS	150枚 × 12箱	4906554-161708	老化後 引っ張り強さ (MPa) ≥ 13 切断時伸び (%) ≥ 400 (ASTM D5250)
			S	150枚 × 12箱	4906554-160609	
			M	150枚 × 12箱	4906554-161616	
			L	150枚 × 12箱	4906554-161623	

◆素材：塩化ビニル樹脂（可塑剤）、ニトリルゴム ◆生産国：中国

川西工業株式会社

岐阜県安八郡神戸町 1753-5 〒503-2305
TEL (0584) 27-3161 FAX (0584) 27-8054
<http://www.kawanishi-kk.co.jp>

川西工業HP

