



THE TOP IN QUALITY
for all areas of healthcare

トプニック ET-100

自己検温が困難な患者様へ



自己検温が難しい患者様の
気分や体調をうかがいながら
検温ができます。



検温の負担を軽減する様々な機能が、
患者様とのよりよい
コミュニケーションを生み出します。

リセット機能

電源を切ることなくリセットキーを押すことで、
複数の患者様への連続検温が可能です。
また、ワキに挟んだまま再度検温することも可能です。

扱いやすいプローブ形状


患者様のワキに挟みやすく、
検温時に保持しやすいプローブ形状です。
また、プローブはアルコール消毒が可能です。

無接点充電方式

充電器に置くだけで簡単に充電ができます。
また、本体と充電器の接続部がないため、
清掃・消毒が簡単です。


軽量でコンパクト

本体の重量は300gと軽量かつコンパクトなので、
首にかけて使用する場合の負担を軽減します。

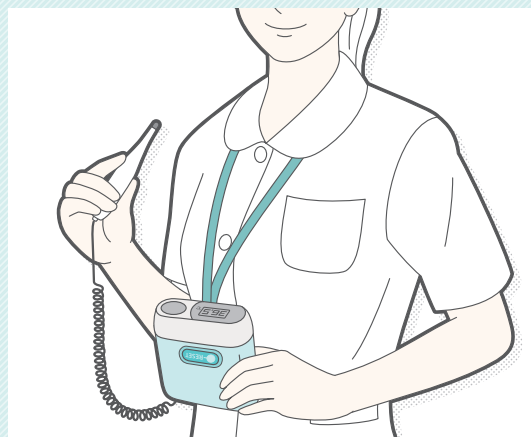

プローブ収納による電源ON/OFF

プローブの抜き差しだけで電源のON、OFFが可能です。
また、収納部に磁石を搭載しているため、プローブの脱落を
防止します。

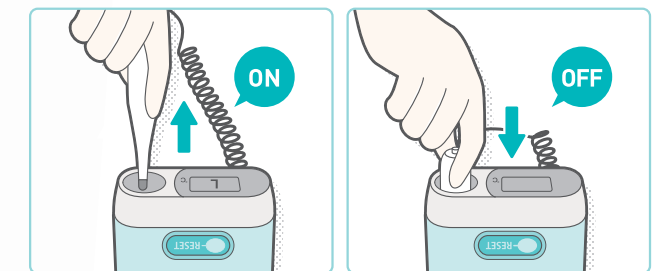


大きな温度表示


視認性の高い表示部です。また、測温部と表示部が分離して
いるため、検温しながら体温表示を確認できます。

トップ独自のアルゴリズム

独自の予測アルゴリズムで測定開始から約20秒の体温の上がり方を分析・演算することで、約10分後の平衡温度を予測することができます。

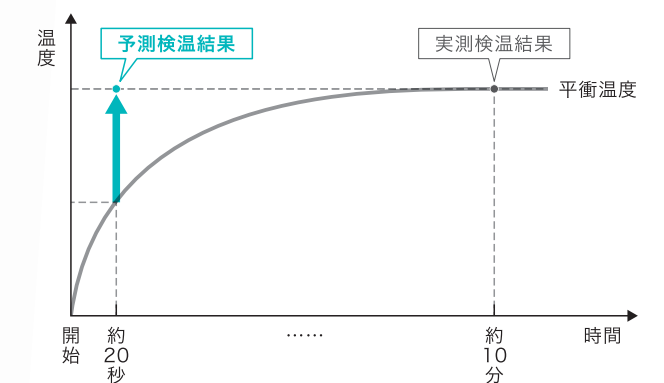

予測検温から実測検温へ自動切替

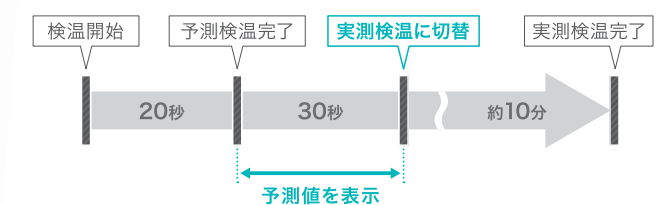

トブニック ET-100

仕様

一般的名称	電子体温計
販売名	トブニック ET-100
型式	ET-100
医療機器認証番号	229ALBZX00011000
クラス分類	クラスII 管理医療機器
電源	内蔵バッテリー:DC3.6V 1500mAh Ni-MH(型式:BP-55)(本体) AC電源(商用):AC100~240V 50/60Hz(充電器)
検温部位	腋窩(ワキ)
測定方式	予測式(予測検温・実測検温兼用)
体温表示	3桁デジタル表示、0.1℃毎
測定精度	±0.1℃(実測検温)
測定範囲	予測検温:34.0~43.0℃ 実測検温:30.0~43.0℃
測定時間	予測検温:約20秒 実測検温:約10分
使用可能回数	予測検温:約10000回 実測検温:約500回 但し、満充電された新品バッテリー使用時
外形寸法	120(幅)×45(高さ)×120(奥行)mm(本体) 70(幅)×110(高さ)×140(奥行)mm(充電器)
重量	約500g(本体のみ300g)

●イラストはイメージ図であり、製品とは異なる部分がありますので、ご了承下さい。 ●製品改良にともない予告なく仕様、外観などを変更させて頂く場合がありますので、ご了承下さい。

製造販売業者

株式会社トブニック

本社:〒120-0035
東京都足立区千住中居町19番10号