

規 格

■ 歯ブラシ・スポンジブラシ

商品コード	品名・規格	入数	JANコード
21-810	NOHCS吸引歯ブラシ（スポンジ付き）	50本/箱	4987458218101
21-811	NOHCS吸引歯ブラシ（スポンジなし）	50本/箱	4987458218118
21-820	NOHCS吸引スポンジブラシ	50本/箱	4987458218200
21-830	NOHCSスポンジブラシ	50本/箱	4987458218309


■ マウスウォッシュ 医薬部外品

商品コード	品名・規格	入数	JANコード
21-850	NOHCSマウスウォッシュ（パウチタイプ）	6mL×30包	4987458218507
21-851	NOHCSマウスウォッシュ 300mL	300mL×4本	4987458218514

■ マウスペースト 医薬部外品

商品コード	品名・規格	入数	JANコード
21-840	NOHCSマウスペースト（パウチタイプ）	2g×30包	4987458218408
21-841	NOHCSマウスペースト 50g	50g×4本	4987458218415

関連製品 **ニプロバイトブロック B-BOC[®]（ビーボック）**

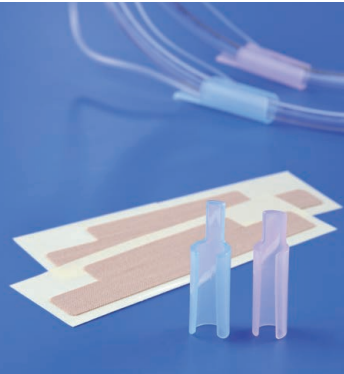

製造販売：ニプロ株式会社

気管内チューブへはめ込む外挿タイプのバイトブロックです。

商品コード	品名・規格	構成品（未滅菌）	梱包	JANコード
51-878	バイトブロック（B-BOC）セット	バイトブロック1個、固定テープ2枚	20セット	4987458518782
51-879	バイトブロック（B-BOC）固定テープ	固定テープのみ	400枚	4987458518799
51-880	バイトブロック（B-BOC）単体	バイトブロックのみ	100個	4987458518805
51-876	バイトブロック（B-BOC）（L）セット	バイトブロック（L）1個、固定テープ2枚	20セット	4987458518768
51-877	バイトブロック（B-BOC）（L）単体	バイトブロック（L）のみ	100個	4987458518775

販 売 名：ニプロバイトブロック 一 般 的 名 称：短期的使用口腔咽喉エアウェイ
医療機器届出番号：27B1X00045000079 ク ラ ス 分 類：クラスⅠ（一般医療機器）

NOHCS
口腔ケアシリーズ



NOHCS 口腔ケアシリーズ

NOHCS吸引歯ブラシ

吸引チューブに接続することで、
1本で吸引とブラッシングが可能な
吸引機能付き歯ブラシです。



NOHCS吸引歯ブラシ(スポンジ付き)

吸引歯ブラシの背面にスポンジがついており、
吸引・ブラッシングに加え
清拭が1本で可能です。



NOHCS吸引スポンジブラシ

吸引チューブに接続することで、
1本で吸引と清拭が可能な
吸引機能付きスポンジブラシです。



NOHCSスポンジブラシ

口腔粘膜に配慮した、
きめ細かく、ソフトなスポンジブラシです。
しなりにくい硬質な柄を使用しています。



医薬部外品 ノンアルコール

NOHCSマウスウォッシュ(パウチタイプ) 6mL×30包/箱


NOHCSマウスウォッシュ(ボトルタイプ) 300mL/本

薬用成分として塩化セチルピリジニウム (CPC) を配合しております。
NOHCSマウスウォッシュはブラッシングとの併用で歯肉炎の予防や口臭の防止効果を示します。



使用方法


1 吸引歯ブラシまたは吸引スポンジブラシを
吸引チューブに取り付けます。

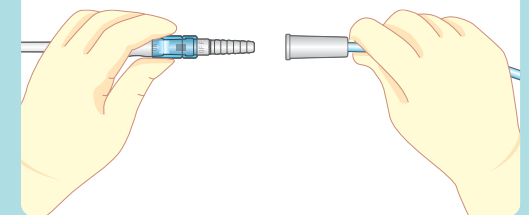

2 マウスウォッシュを容器内に出します。



3 ブラッシング
マウスウォッシュを適量つけ、吸引しながら
ブラッシング・清拭を行います。

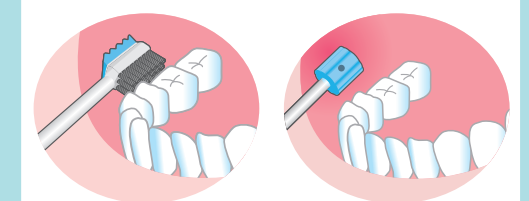

4 仕上げにマウスペーストを口腔粘膜・
舌に薄く塗布します。
マウスペーストはスポンジブラシによく
染みこめると、簡単に薄く塗布する
ことができます。



医薬部外品 ノンアルコール

NOHCSマウスペースト(パウチタイプ) 2g×30包/箱

NOHCSマウスペースト(チューブタイプ) 50g/本

薬用成分として塩化セチルピリジニウム※(CPC)を配合しております。
湿潤剤を配合しており、口腔ケアの仕上げに、スポンジブラシ
に良く染みこませ、舌・口腔粘膜へ使用します。



※セチルピリジニウムクロリド