


ご使用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また必要な時、読めるように大切に保管してください。

ソルボヨコアーチ シームレスサポーター

からだを守る人工筋肉、ソルボセインを使用した、
ソルボヨコアーチパッドが中足部へのトラブルを軽減します。

●各部分の名称

(注)左右兼用

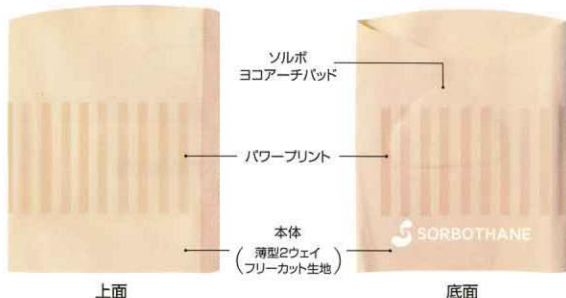

上面

底面

ホームページ <http://www.sorbo-japan.com/>

#96285

使用上の注意

- ・本品の機能を損なわないために、使用方法に従い正しく装着してご使用ください。
- ・就寝中は、使用しないでください。
- ・室内での使用は、生地を性質上することがありますのでご注意ください。
- ・室外用として靴を履く場合、装着時に圧迫感のない靴をお選びください。
- ・装着時間は1日、2-3時間から始めて、徐々に時間を増やしてください。
- ・足裏の痛みや、その他、発疹・かぶれ・うっ血・かゆみ・しびれ等の異常を感じた場合は使用を中止し、専門医の指示に従ってください。そのまま使用を続けると悪化する場合があります。
- ・骨折・ねんざ・靭帯損傷などの発生直後はご使用しないでください。
- ・血行障害・糖尿病の方や、装着部に傷がある場合はご使用しないでください。
- ・はれものや湿疹などお肌に異常がある方や、ゴムなどによるアレルギー疾患をお持ちの方はご使用しないでください。
- ・長時間の使用や高温・多湿下での使用、保管状態によっては、破損する場合があります。破損した場合は速やかに使用を中止してください。
- ・本品は治療用ではありません。効果については個人差があります。
- ・使用目的以外にはご使用しないでください。

お手入れ方法

- 汚れがひどい場合は、中性洗剤をしみ込ませたタオルで汚れた部分をたたきながら落とし、手洗いしてください。
- 洗濯の際、ソルボヨコアーチパッド(ソルボセイン)を折り曲げたり、もみ洗いしないでください。破損の原因になる場合があります。
- 色落ちや色移りする場合がありますので、色の違うものと一緒につけ置きや洗濯をしないでください。



(洗濯表示)

- 品名 ソルボヨコアーチ シームレスサポーター
- 品質 本体：ナイロン・ポリウレタン
パッド：ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)

使用方法

- ①素足に使用してください。
- ②パッドのある面を、底面にして、足先からゆっくり入れ、ソルボヨコアーチパッドを足指の付け根部から、下の位置に配置します。
- ③下図のように、足指を反らせ、親指から小指の付け根(図1の点線部)確認します。点線部にソルボヨコアーチパッドがあたらぬように合せます。

- ④本体の薄型2ウェイフリーカット生地について、しわ等が入っていないか確認し、全体を整えます。
- ⑤上から靴下等(ストッキング含む)を重ね履きした後に、少し歩いてズレ等によるあたりがないか確認してください。

①足指を反らせる。

②点線部にあたらない位置にパッドを配置する。

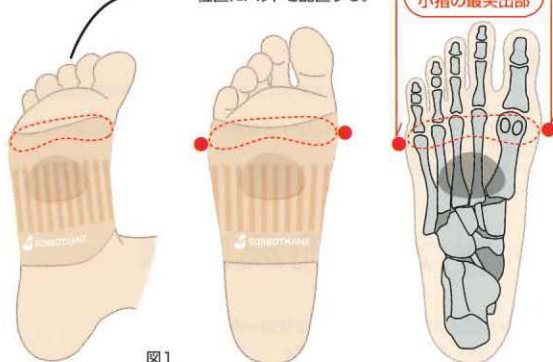


図1

装着位置 目安

小さめサイズの方の装着位置
例:22.0cm

足首よりになります。

大きめサイズの方の装着位置
例:24.5cm



上面



側面