

ルーホフ社製
医療用洗浄剤

エンドザイム AW

7-1104 (4.0リットル 4本入)
7-1112 (500cc 12本入)

中性・低泡性だから、洗浄剤の統一が可能

■3種の酵素を配合（脂肪・炭水化物・たんぱく分解酵素）

限りなくある分解酵素の中から医療の汚れに対する分解能力の高い酵素を配合しました。短時間で高い洗浄効果が得られます。

■pH7(中性)で素材を選びません

アルミ、チタン、ゴム、プラスチック等さまざまな素材の器具・鋼製小物を洗浄することができます。内視鏡・マイクロ器械などのデリケートな器具も洗浄できます。

■安全で環境に優しい洗浄剤

pH7(中性)・100%生物分解性で、環境に配慮しており、排水規制にも対応できます。エンドザイムAWは、器具・人・環境に優しい洗浄剤です。

■低泡性、低粘度

低泡性・低粘度で器具の隅々まで浸透し、泡に邪魔されることなく高いブラッシング効果が得られます。また、すすぎ性もよく、洗浄液や汚れの残留の心配がありません。滅菌後の洗浄剤によるシミも防げます。



エンドザイムAWの希釈方法

- ◇洗浄装置で使用する場合
水又は温水1リットルあたり4cc～8cc
- ◇浸漬洗浄で使用する場合
水又は温水1リットルあたり8cc

※具体的な器具の洗浄方法については
発売元までご相談ください。

エンドザイムAWの使用上の注意

- ◇希釈液は毎日交換してください。
- ◇他の洗浄剤、消毒剤との混合は避けてください。
- ◇本製品には、消毒及び滅菌効果はありません。
- ◇使用時には、ゴム手袋、マスク、ガウン等を着用してください。
- ◇高温、多湿、直射日光の当たる場所での保存は避けてください。
- ◇開封後は半年以内にご使用ください。
- ◇誤飲防止のために、保管、取り扱いには十分注意してください。
- ◇万一飲み込んだ場合には、水を飲ませる等の処置の上、専門医の診断を受けてください。
- ◇目に入った場合には、直ちに水で洗い流して専門医の診断を受けてください。