


alfresa

ディスポーザブル
電気手術器用メス先電極

アルシード[®]


医療機器認証番号 301AFBZX00009000
機械器具 (29) 電気手術器
管理医療機器 高周波処置用能動器具 70662000

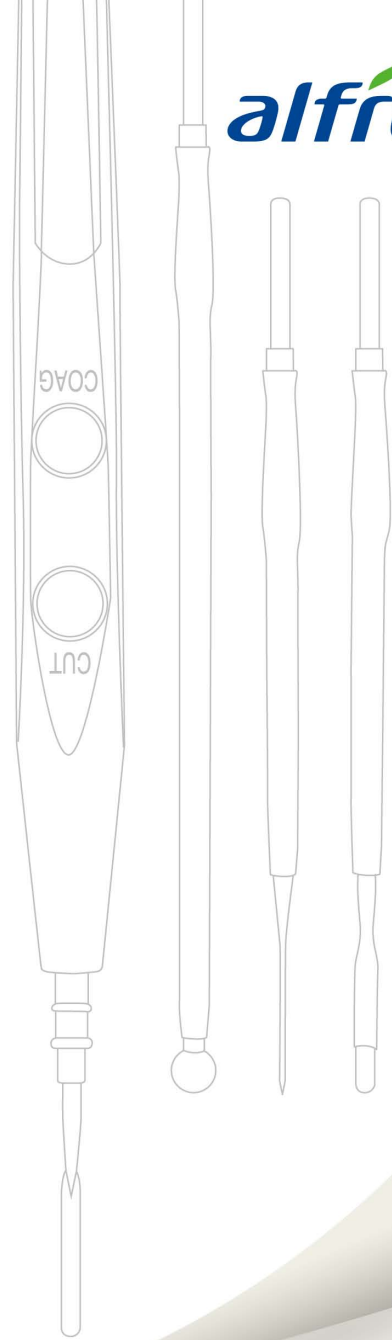

ALCEED[®]

ALCEED[®] は
時代を超えてドクターに愛される電気メスシリーズを目指します。

PTFEコーティングにより、焦げ付きが少なく、

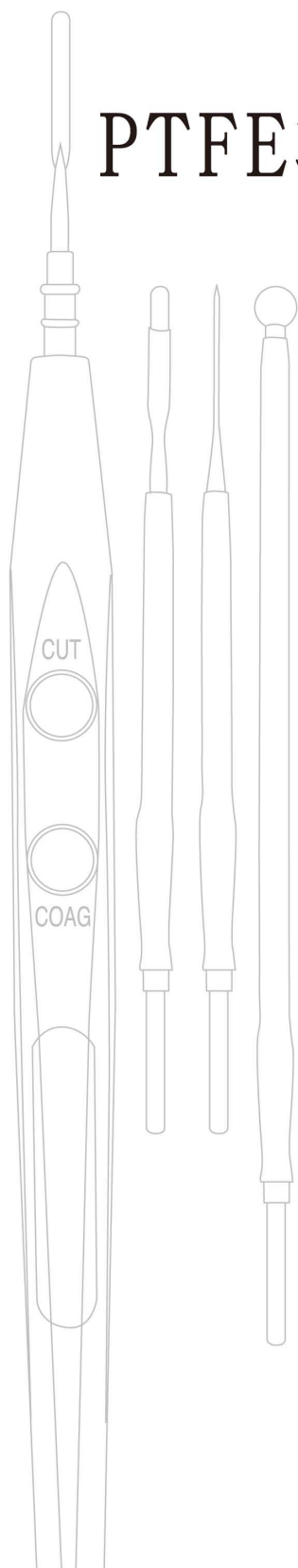

AC-065K 65mm



AC-065KS 65mm



AC-100K 100mm



AC-100KS 100mm



AC-125K 125mm



AC-125KS 125mm



AC-165K 165mm



AC-165KS 165mm



ブレード電極

※ブレード電極は約60度弯曲させることができます。
詳しくは添付文書をご参照ください。

ペンシル


※ホルスター付き

ACP-065K



スムーズな切開・凝固が可能なメス先電極です。

メス先電極の軸径は2.4mmです。

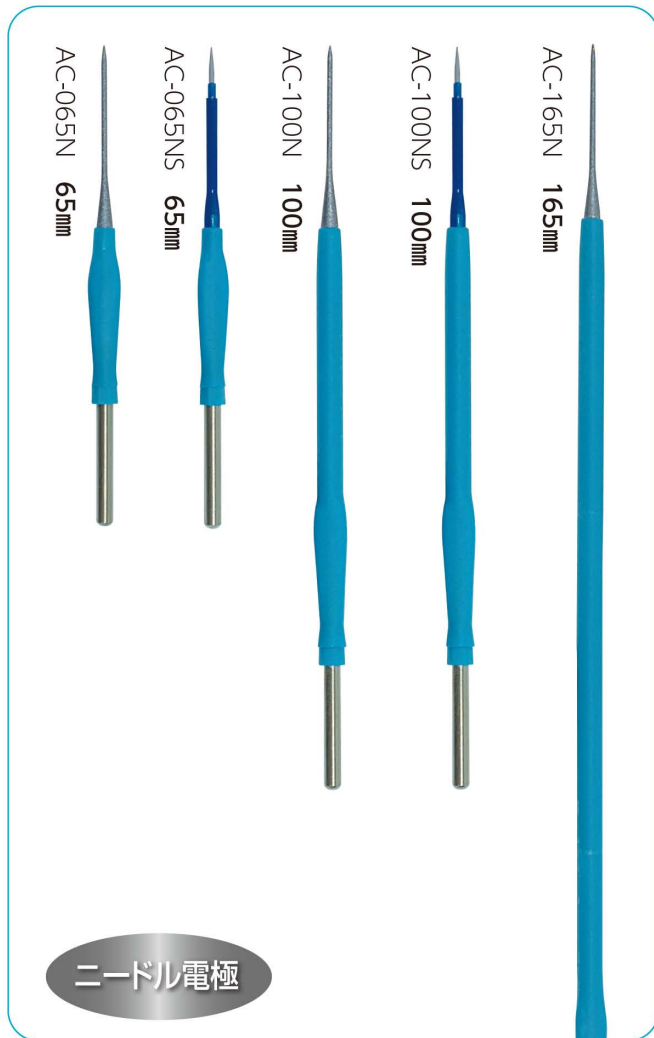

※コーティング無し
タングステン製

ALCEED® はラテックスフリーです。



	規 格	製品仕様	入 数	JANコード 4987274
ディスプレイザブル	AC-065K	ブレード 65mm	12	13406-7
	AC-065KS	ブレード 65mm 少露出型	12	13407-4
	AC-100K	ブレード 100mm	12	13408-1
	AC-100KS	ブレード 100mm 少露出型	12	13409-8
	AC-125K	ブレード 125mm	12	13410-4
	AC-125KS	ブレード 125mm 少露出型	12	13411-1
	AC-165K	ブレード 165mm	12	13412-8
	AC-165KS	ブレード 165mm 少露出型	12	13413-5
	AC-065N	ニードル 65mm	12	13414-2
	AC-065NS	ニードル 65mm 少露出型	12	13416-6
	AC-100N	ニードル 100mm	12	13418-0
	AC-100NS	ニードル 100mm 少露出型	12	13419-7
	AC-165N	ニードル 165mm	12	13420-3
	AC-065M	マイクロニードル 65mm	12	13417-3
	AC-060B	ボール5mm 60mm	12	13421-0
	AC-125B	ボール5mm 125mm	12	13422-7
	ACP-065K-20	ペンシル コード長3m	20	13423-4
	ACP-065KS-20	ペンシル コード長3m	20	13424-1
	ACP-065KK-20	ペンシル コーティング無し電極付 コード長3m	20	13425-8
	ACP-065K-50	ペンシル コード長3m	50	13427-2
	ACP-065KS-50	ペンシル コード長3m	50	13428-9
	ACP-065KK-50	ペンシル コーティング無し電極付 コード長3m	50	13429-6

※ACP-065K-20とACP-065K-50、ACP-065KS-20とACP-065KS-50、ACP-065KK-20とACP-065KK-50は入数が違います。
※EOガス滅菌済み



警 告

〈使用方法〉

- 1) 酸素や亜酸化窒素などの可燃性ガスの濃度が高くなっているところでは、一時的にこれらの濃度を低下させてから使用すること。
[酸素及び亜酸化窒素(N₂O)は火勢を強め、激しい燃焼を引き起こすため。]
- 2) 可燃性の液体や物質(アルコール性の皮膚消毒剤、チンキ類、液体包帯、骨セメント及び乾燥したガーゼ)などが存在するところでは、十分に蒸発させるなどこれらの物質を除去する措置を講じてから使用すること。特に体の下や臍のような人体の陥凹部や、体の下などに可燃性溶液が溜まらないように注意すること。
[電気手術器は、正常な使用であってもアクティブ電極の先端から火花が発生し、着火源となって患者及び手術スタッフに熱傷など重大な健康被害を与える可能性があるため。]
- 3) 可燃性麻酔剤や可燃性ガスを除去すること。又、体内で発生する可燃性ガスも含めて気化したガスなどが充満しないように排除すること。
[アクティブ電極からの火花により爆発・引火を引き起こす可能性があるため。]
- 4) 一時的に使用しないアクティブ電極は患者から離し、専用のホルスターなどに収納するか、絶縁された器具台に置くこと。
特に使用直後のアクティブ電極は患者体表面や覆い布の上には直接置かないこと。
[使用直後のアクティブ電極先端は、高周波電流により発熱している。乾燥しているガーゼや覆い布などの発火や、患者や手術スタッフの熱傷の原因となるため。]



禁忌・禁止

〈使用方法〉

再使用・再滅菌禁止。