

針刺し防止機構付き留置針

# Supercath<sup>®</sup> 7 ご使用方法

## ご使用方法

ご使用前に製品の添付文書をご確認ください。



1

包装は1本ずつ大きく開封します。  
(開封が十分でない場合、プロテクターが外れて針が露出する可能性があります。)



2

プロテクターは2本の指ではさむようにすることで片手で外すことも可能です。  
**SMOOTH TOUCH**



3

内針の刃面の向きを確認します。



4

逆流が確認できる深さまで穿刺します。



5

プッシュタブを押しカテーテルを送り込みます。



6

内針を抜去します。



7

内針抜去時にはカテーテルハブを保持してください。



8


カテーテルハブに止血弁が内蔵されているため圧迫止血が不要です。



9

輸液セットを押し込み止血弁を開放し接続してください。  
通常通りの手技で接続できます。

止血弁について

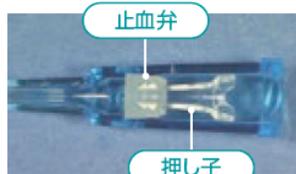

押し子が押され止血弁が解放されます。



シリンジを接続して採血することも可能です。

**止血弁の機能は一回限り有効です。**

シリンジや回路を一度接続した後に取り外し、再接続する際には圧迫止血が必要です。

※本カタログ内における語句「止血弁」は「圧迫止血補助弁」を指します。



メディキット株式会社