

摩擦を軽減し床ずれ予防に スライディングシート

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました

ベージュ

- +** 滑りやすいシート
スムーズな移動で床ずれ防止
- +** 抱え込まずに移動
ストレスを与えず拘縮^{こうしゆく}を予防
- +** 持ち上げずにらくらく移動
介護者の腰痛予防に



体位変換やベッド上での移動を
サポートする筒状のシートです。



スライディングシートで、“ノーリフティングケア”を

“ノーリフティングケア”とは 被介護者を無理に持ち上げない・抱え上げない介護 のことです。

床ずれ予防

摩擦を軽減することで、
床ずれを予防します。

こうしゆく※
拘縮予防

持ち上げる・抱え上げるなどのストレスを
与えないことで、拘縮を予防します。

腰痛予防

持ち上げずに除圧をすることで、
介護者の腰痛を予防します。

※関節が硬くなり動かしにくくなった状態のこと。

商品特長

+ 1. 滑りやすく敷きやすい素材と形状

- フッ素加工を施した滑りやすい素材のシートを筒状にしているため、被介護者を無理に抱え上げることなく、スムーズな移動ができます。
- 筒状になっているため、シート同士を合わせる手間が省け、簡単に準備ができます。

+ 2. 保管がかんたんな吊り下げループ付き

- ベッド周りに吊り下げて保管でき、必要時すぐに使用できます。また、踏みつけによる介護者の転倒などのリスクを軽減します。



+ 3. 選べるシートサイズ

- 被介護者の体力にあわせてシートのサイズを選ぶことができます。

ふつうサイズ

自分で腰を上げられない方むけ
頭・肩・お尻が乗るようシートを敷いて使用します。



小さめサイズ

自分で腰を上げられる方むけ
頭・肩が乗るようシートを敷いて使用します。



+ 4. 使用方法を案内

- 包装箱のQRコードからアクセス(弊社ホームページ)していただくと、使用方法の動画や、商品の詳しい情報を見ることができます。






商品情報

■使用用途

- ベッド上での身体移動・体位変換

■使用方法

※詳細は上記QRコードから見るることができます。

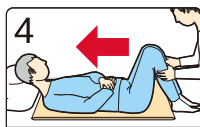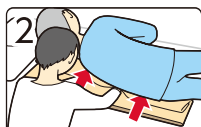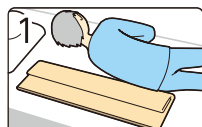


横向きに寝かせ、3ツ折りにしたシートを頭からお尻までが乗るように敷きます。

折ったシートの内側に手を差し込み、シートを押し込みます。

再度仰向けに寝かせ、シートをベッド全体に広げるように身体の下から引き出します。

ひざを立て、両手で頭側へ押し出し、シートを滑らせて身体を移動させます。

■規格

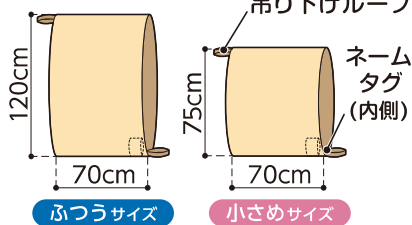

■素材

ポリエステル 100%

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
75171	PH スライディングシート ふつうサイズ ページュ 1枚入 70cm×120cm	販売単位 115 × 235 × 35	100.0g	40個	スライディングシート ふつうサイズ	4971032751719
		外装 490 × 390 × 250	4.8kg		4 971032 751719	—
75170	PH スライディングシート 小さめサイズ ページュ 1枚入 70cm×75cm	販売単位 115 × 235 × 35	60.0g	40個	スライディングシート 小さめサイズ	4971032751702
		外装 490 × 390 × 250	3.2kg		4 971032 751702	—

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
http://plus-ph.com



PLUS HEART
ブランドサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。