

arkray

アークレイはより良い糖尿病療養のための測定器をご提案します。

血糖値をよく見よう

新登場



自己検査用グルコース測定器

GlucoCard PRIME


グルコカード プライム

GT-7510

医療機器 認証番号 301AABZX00059000

分類 クラスIII (高度管理医療機器)

特定保守管理医療機器

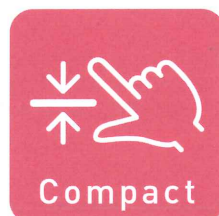

薄く・コンパクトなデザイン



見やすい画面表示を追求



音声ガイド機能を標準搭載



療養支援機能を搭載

シンプルな機能性はそのままだに、いっそう使いやすい ・・・そんな血糖測定器をご提案します。


見やすい画面

センサーを差すだけで、電源が入り測定が開始できます。画面はカラー液晶を搭載しており、カラーイラスト表示や視認性のよいフォントを採用しました。測定操作やエラー時の対応方法は文字とイラスト表示でサポートします。




シンプルな操作

センサー挿入口を下部にすることで、メーターの向きを変えずに測定結果を確認することが可能です。

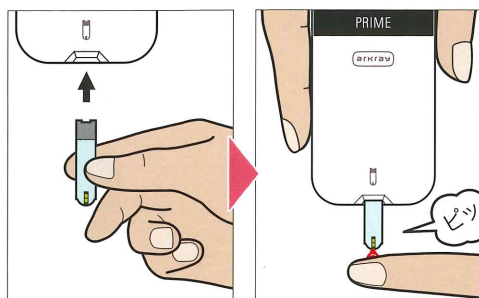

音声で測定操作をアシスト

音声のガイドの例

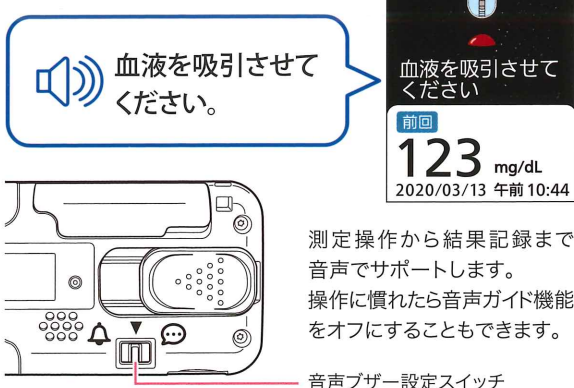

測定操作から結果記録まで音声でサポートします。操作に慣れたら音声ガイド機能をオフにすることもできます。

音声ブザー設定スイッチ


血糖値の振り返り機能(療養支援機能)

下限値または上限値を超えた場合に色を付けたり、測定時に原因情報をつけることができます。

低値・高値原因入力機能

値が低い時、高い時には、その原因が入力でき、患者さん自身と医療従事者が血糖値を振り返ることに役立ちます。


低値の場合

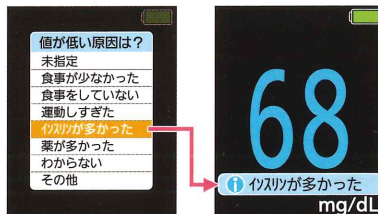

低値・高値検索機能

測定結果の検索ができ、低値・高値の発生時期や頻度が簡単に把握できます。

低値検索

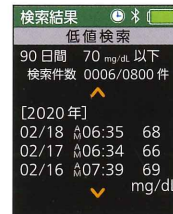

※ 目標値の下限値、上限値の設定は必ず医師の指導のもとで行い、ご利用ください。

【仕様】自己検査用グルコース測定器 グルコカードプライム (GT-7510)

測定項目: 血液中のグルコース

測定範囲: 10 ~ 600mg/dL

必要検体量: 0.6μL (全血)

使用センサー: 自己検査用グルコースキット グルコカードプライムセンサー / Gセンサー (アルミパック包装 / ボトル包装)

測定時間: グルコカードプライムセンサー / 着検知後 7 秒
Gセンサー / 着検知後 5.5 秒

記憶データ数: 1,100 測定

外部入出力: マイクロ USB (B) コネクタ 1 個、Bluetooth Low Energy (Bluetooth Ver.4.2)

使用環境: グルコカードプライムセンサー / 温度: 5 ~ 45℃、湿度: 20 ~ 80% (非結露)
Gセンサー / 温度: 10 ~ 40℃、湿度: 20 ~ 80% (非結露)

外形寸法: 横 45 × 縦 120 × 高さ 14 (mm)

重量: 約 82g (乾電池含む)

電池: 単 4 形アルカリ乾電池 2 本

電池寿命: 約 1,000 測定 (使用方法により測定可能回数が減ることがあります。)

消費電力: 1.8W (最大)

グルコカードプライムは電池を装着して出荷しておりますので、すぐに測定を開始していただけます。ただし、出荷時に装着された電池はサンプル用のため、記載の電池寿命は保証できません。

関連製品

自己検査用グルコースキット グルコカードプライムセンサー

体外診断用医薬品 承認番号 30100EZ00021000



ボトル包装

アルミパック包装

ボトル包装: 25 枚入 / 30 枚入
アルミパック包装: 25 枚入 / 30 枚入
製造販売元: PHC 株式会社

自己検査用グルコースキット Gセンサー

体外診断用医薬品 承認番号 21400AMZ00483000



ボトル包装

アルミパック包装

ボトル包装: 25 枚入 / 30 枚入
アルミパック包装: 25 枚入 / 30 枚入
製造販売元: PHC 株式会社

発売元 アークレイ株式会社
製造販売元 株式会社アークレイ ファクトリー
販売元 アークレイ マーケティング株式会社

〒160-0004
東京都新宿区四谷1-20-20大雅ビル4F
TEL 050-5527-7700 (代)
URL <http://www.arkray.co.jp/>

※仕様は予告なく変更することがあります。

お問い合わせ先

担当

アークレイ コールセンター 6:00~22:00 (年中無休)
0120-81-1955