



一般医療機器
届出番号：27B1X00024000400
販売名：CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック

ホット&コールド コンフォートジェルパック

「温める」「冷やす」両方に対応!

- 電子レンジで**直接**温めることができます。(容器に入れる必要はありません)
- 繰り返し使用できます。
- 凍らせても硬くなりません。



GP102



GP602



GP302



GP402



GP502

ご使用方法

- 冷湿布** 冷凍室または冷凍庫で冷却してください。
※最低1時間冷却してください。
- 温湿布** 熱湯または電子レンジで温めてください。
※500～600W：約60秒
1000W：約30秒
温かさが足りない場合は10～20秒ずつ温めてください。
破裂する恐れがあるため、2分以上連続して温めないでください。

注文コード	品番	規格	サイズ	入数	標準価格
N99-003-01	GP102	頭・首用	76.2×406.4mm	1箱(6個入)	¥6,000
N99-003-05	GP602	ユニバーサルS用	152.4×152.4mm	1箱(8個入)	¥8,000
N99-003-02	GP302	多目的用	114.3×266.7mm	1箱(6個入)	¥6,000
N99-003-03	GP402	ユニバーサルM、背中・腰・腹部用	152.4×254mm	1箱(6個入)	¥6,600
N99-003-04	GP502	ユニバーサルL用	254×381mm	1箱(6個入)	¥12,000