

プラム清拭車 PS-2000

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくため、

ご使用前に、この『取扱説明書』を必ずお読み下さい。

なお、内容の確認がいつでも出来る様この『取扱説明書』は大切に
取り扱って下さい。

村中医療器株式会社

— 目 次 —

[1] 安全上の注意	2
[2] プラム清拭車PS-2000について	
〈 2-1 〉 特 長	4
〈 2-2 〉 各部の名称	4
〈 2-3 〉 仕 様	5
〈 2-4 〉 寸法図	5
[3] ご使用方法	
〈 3-1 〉 準 備	6
〈 3-2 〉 準 備	6
〈 3-3 〉 排 水	6
〈 3-4 〉 操 作	7
[4] 空焚き防止装置	8
[5] 異常な場合の処置	8
[6] お手入れ	8

〔1〕安全上の注意

必ずお守り下さい。

- ・ ご使用の前に『安全上の注意』をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- ・ ここに示した注意事項は安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守って下さい。
- ・ 表示と意味は次のようになっています。



警告

誤った取扱いをしたとき、重大な事故につながる可能性を告げるもの。



注意

誤った取扱いをしたとき、状況によっては事故につながる可能性及び本体の故障につながる可能性を告げるもの。

- ・ 本文中に使われる図記号の意味は次の通りです。



：絶対に行わないで下さい。



：必ず指示に従い、行って下さい。



：電気プラグを必ずコンセントから抜いて下さい。



：必ずアースを接続して下さい。



警告

- ❗ 改造はしないで下さい。また、修理技術者以外の方は、分解、修理をしないで下さい。
- ❗ 患者さん等の通路となる場所での使用はしないで下さい。
- ❗ 使用中は本体全体が熱くなります。直接手を触れない様にして下さい。
- ❗ 蓋を開ける際、蒸気が立ち昇ります。顔を近付けずゆっくりと蓋を開けて下さい。
- 🚫 使用の際、近くに引火性・爆発性の薬品等は置かないで下さい。
- 🚫 この取扱説明書に示されている操作法及び安全に関する注意事項はPS-2000を指定の目的に使う場合だけに関するものです。
それ以外の使い方は絶対に行わないで下さい。

注意


- ❗ 本体を水につけたり、水を掛けたりしないで下さい。
- ⚡ 必ずアースを接続して下さい。
- 🔌 電気コードは引っばらず必ずプラグをもって抜いて下さい。
- 🚰 槽内外のお手入れ、給排水を行う場合は電気プラグを抜いてから行って下さい。
- ❗ 槽内の清掃を定期的に行って下さい。
- ❗ 電気プラグを抜く時は、必ず本体の電源スイッチ、及び漏電ブレーカーを切ってから行って下さい。
- ❗ 定格15A以上のコンセントを単独で使用して下さい。
- ❗ 濡れた手でコンセントを抜き差ししないで下さい。

[2] プラム清拭車PS-2000について

〈2-1〉特 長

- ① 材 質 …………… 高品質焼付塗装及びステンレス（SUS-304）使用により優美で耐久性に優れています。
- ② 操作性 …………… 温度調節器とタイマーの組合せによりスイッチを押すだけで、自動的に加湿から保温まで行程が進行します。
- ③ 空焚き防止装置 …… 使用中水量が一定以下になり、空焚き状態になると自動的にヒーター電源が遮断され、ランプとブザーにより水量不足を知らせます。
（水量が一定以下になってから、3分程度遮断に時間がかかります）
- ④ ヒーター …………… 800W使用により急速に大量の蒸気を得られる為タオルをむらなく加湿保温することができます。
- ⑤ その他 …………… 使用済タオル入れ2個付・給水用容器1個付


〈2-2〉各部の名称

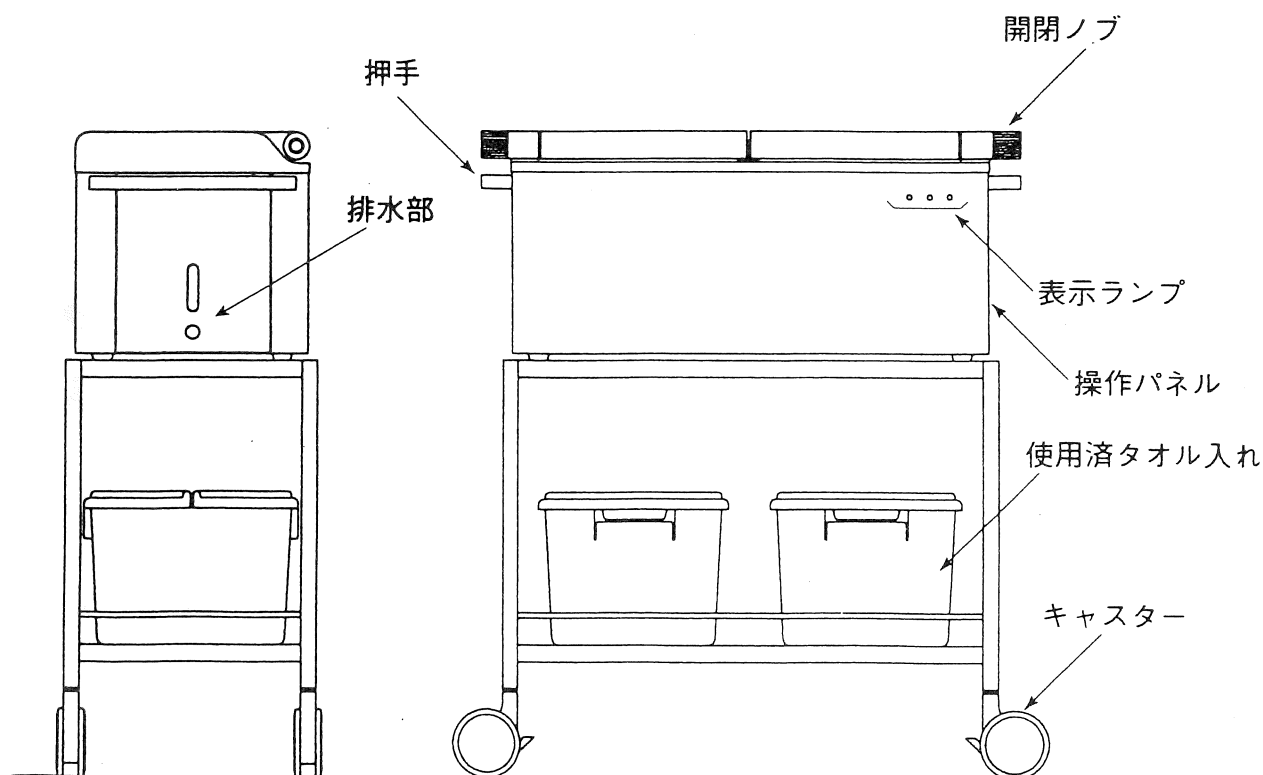

〈2-3〉仕 様

寸 法	幅800×奥行340×全高950mm（架台共） ※（幅937×奥行405×全高940mm 架台共）
材 質	外装・下台（下棚共） スチール（塗装） 内槽・バスケット 4個 SUS304ステンレス製 使用済タオル入れ（ダスターBOX） キャスター自在車 100mm
本体重量	約31kg ※（約32kg タオル入れ・スノコ 5kg 架台10kg 総重量約47kg）
最高水位（水量）	約4.3ℓ ※（約5.6 $\frac{1}{2}$ ℓ）
電源・消費電力	AC100V、800W
収納数	小タオル 約100本 ※（タオル） //
標準付属品	使用済タオル入れ 2個 給排水容器 1個 タオル用バスケット25本用 4個

〈2-4〉寸法図

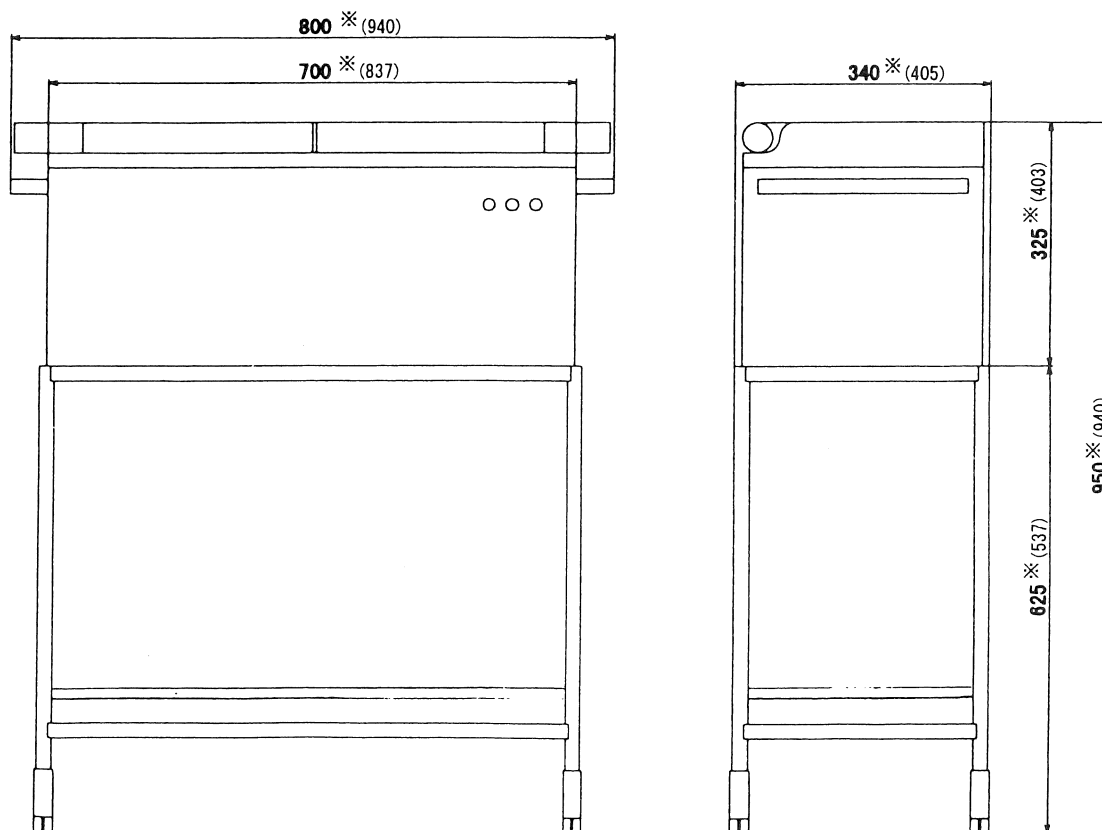


※（ ）内はPS-2000BIG

[3] ご使用方法

〈3-1〉準備

水か湯に浸したタオルを軽く絞ってから、専用のバスケットに立てて収納して下さい。

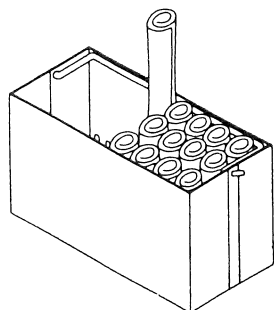


⚠ 注意

蒸気の通りを良くする為、軽く絞って立てて収納して下さい。

〈3-2〉準備

水面計レベルの最高位置まで給水して下さい。

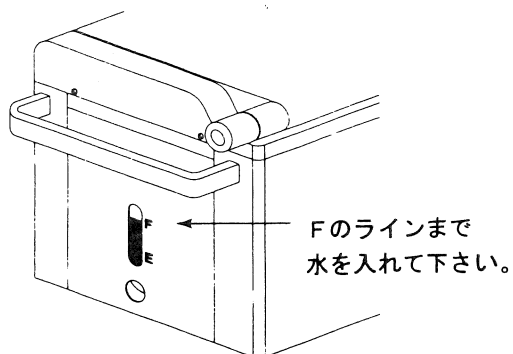

⚠ 注意


使用する前には必ず水位の確認を行い不足している時は指定の水位まで水の補給をして下さい。

使用中水量がEのライン以下になり、電源スイッチONの状態、水を補給する時は蒸気に注意して下さい。


手袋のご使用をおすすめします。

〈3-3〉排水

排水ドア 外し方

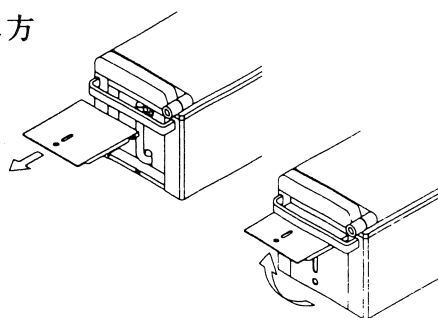

排水時以外は、取付けのチェーンをブラケットに必ず引っかけて下さい。

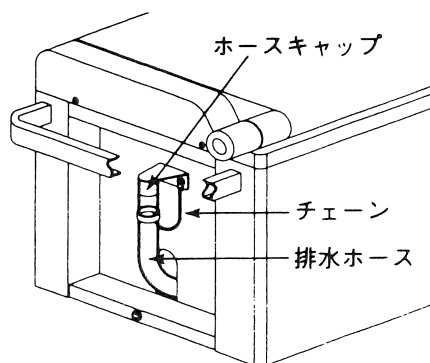

⚠ 警告

電源スイッチONの状態ではもちろん、OFFにした時でも温度が下がるまでチェーンをはずしたり、排水はしないで下さい。

〈3-4〉 操 作

操作方法

① 漏電ブレーカーを入にする。

② 電源スイッチON……加熱ランプ（黄色）点灯（加湿完了まで点灯）

* この操作のみで自動的に加湿が行われ、その後保温状態を維持します。

③ 加湿完了……殺菌の為、30分間の沸騰を行います。




④ 保温ランプ（ミドリ色）点灯 （タオル使用可能）

保温状態になると加熱ランプ（黄色）が消灯し、保温を示す
保温ランプ（ミドリ色）が点灯します。

* 保温状態から再加湿を行う時は再加熱スイッチを1秒間程押し続けて下さい。

操作パネル盤

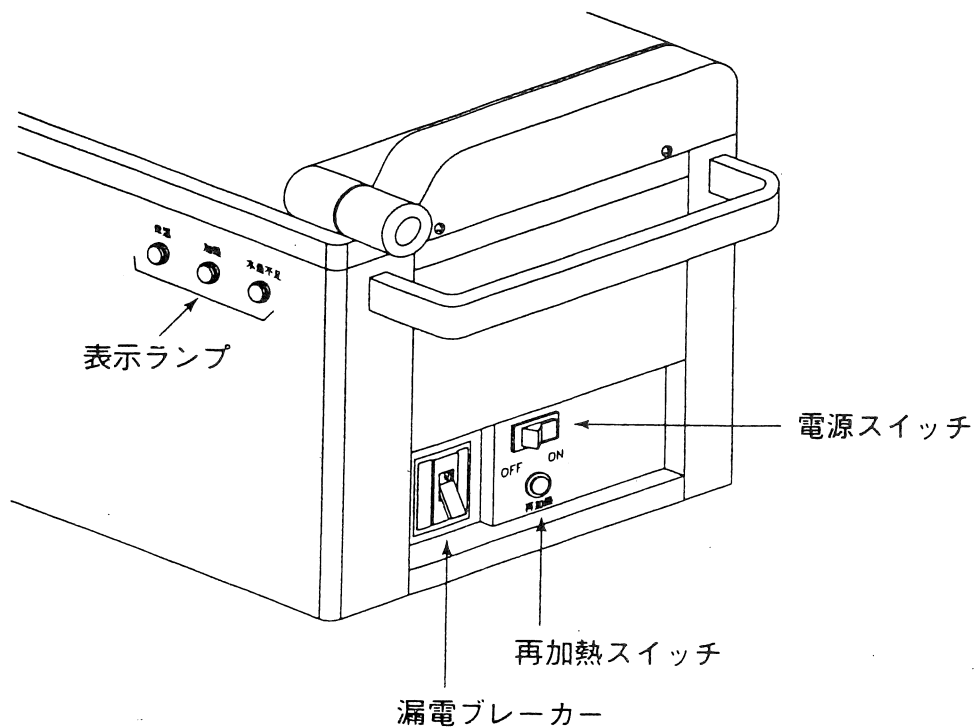

[4] 空焚き防止装置

使用中、水量が一定量以下になりヒーターが過熱すると電源が遮断されます。

この時ブザーが10秒間鳴り水量不足ランプ（赤色）が点灯します。

この場合は、水を補給してから1度電源をOFFにし、再度スイッチをONにして下さい。

※この際ヒーターに負荷がかかりヒーターの寿命を縮めますので防止装置が作動する前に水を補充する事をおすすめします。

[5] 異常の場合の処置

◎下記以外の異常・原因の場合、また下記処置では解決しなかった場合には、ご購入先あるいは弊社各営業所までご連絡下さい。

◎また修理依頼される際は、本体内の水を完全に排水して下さい。

輸送途中、電子部分に水が掛かり、新たな故障原因となります。

現 象	調 べ る と こ ろ	処 置
電源スイッチをONにしても電源が入らない。 どのランプも点灯しない	・電源コードがコンセントに確実に差し込まれていますか？ ・ブレーカーボタンが遮断状態（切）になっていませんか？	・コンセントに差し込み直して下さい。 ・ブレーカーボタンを（入）にして下さい。
加湿しない。	・加熱ランプ点灯中になっていませんか？	・加湿後（使用可能後）保温ランプが点灯するまでお待ち下さい。
保温ランプが点灯しているのにタオルが冷たい。	・タオル入替え後、給水、再加熱ボタンを押しましたか？	・再加熱ボタンを押し保温状態（ミドリランプ点灯）になるまでお待ち下さい。
供給側ブレーカーが落ちてしまう。	15A以上のコンセントを単独で使用していますか？	15A以上のコンセントに入れ直して下さい。

[6] お手入れ

長く使用していると、タンク内に水アカが付着して来ますが、市販されているポット等の洗剤（ステンレス使用可能な物）で汚れを落とすことが出来ます。

その際の取扱いは洗剤の指示にしたがって下さい。

保証規定

- 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理致します。
 - 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書替えられた場合。
 - 消耗部品。
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - その他取扱説明書(本書)に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 - この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、弊社製品を、お買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかしながら通常のご使用において万一、不具合が発生しました場合には、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理致します。

商品名					
品番		注文コード		製造番号	

※お引き渡し日	年 月 日
保証期間	お渡し日より 1年間
対象部分	本体
※ 貴院名	
※ご使用者名	
※ ご住所	〒
TEL/FAX	/

ご販売店様へ

※印の欄を必ず記入してからお渡し下さい。

※販売店名	
住所	〒
TEL/FAX	/

村中医療器株式会社

大阪市中央区船越町二丁目3番6号
TEL.06-6943-1221



村中医療器株式会社
MURANAKA MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.

■本社 〒540-0036 大阪市中央区船越町二丁目 3-6 ☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360

<http://www.muranaka.co.jp/>