

ヘバーデン結節、 ブシャール結節の安静保持にヘバループ

医療機器製造販売届出番号

13B1X10279000001

一般医療機器 手・指用副木



ヘバループは、変形性関節症により疼痛を生じる
指の関節を安静に保ちます。

製品の特長

- > 関節の側方のみを固定するため、指の
曲げ伸ばしが可能です。
装着の向きを変えると、可動域を制限できます。

- > 日々変わる関節の状態に合わせて、
サイズを微調整できます。

- > 日本人の指の統計データに基づいたサイズ展開

サイズ	関節の周囲長(mm)
S	30 - 39
M	38 - 50
L	47 - 62
XL	58 - 76

* 境界のサイズの場合は、小さめを選択してください。


* 関節の周囲長を測れない場合は、一般的なファッションリングの内周を参考にしてください。

ファッションリングのサイズ


サイズ	内周(mm)	サイズ	内周(mm)
1号	40.8	18号	58.6
7号	47.1	21号	61.8
10号	50.3	32号	73.3

装着方法

関節の側方のみを固定する時

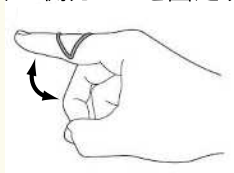


関節の全周を固定する時

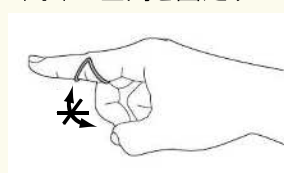


サイズが大きい時

装着したまま、軽く押して
調整します。

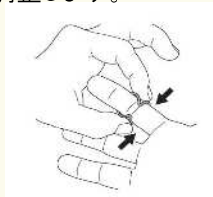

サイズが小さい時

外して、指で広げて
調整します。

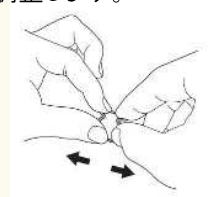

販売元 株式会社リブレッシュ

東京都千代田区神田三崎町3-4-9

<http://www.liveresh.com>

製造販売元 株式会社メディカルラボパートナーズ