

HUNTLEIGH

Muranaka

しゃべりカゴ

超音波胎児心音計 ソニケイド



コンパクトなボディに
クリアなサウンドを実現

しゃべりカゴログ

しゃべりカゴ

心音

特長

を
ナレーション付動画で
ご確認ください！



1979年の創業以来

英国のHUNTLEIGH社は超音波胎児心音計の進化に貢献し続けてきました。

新開発のSRシリーズは、ダイナミックデジタルノイズリダクション(DDNR)システムによりクリアなサウンドを実現するとともに、高解像度カラーディスプレイは心拍数をより明瞭に表示します。

DDNR

ダイナミックデジタルノイズリダクション(DDNR)システム

- デジタルサウンド処理により、バックグラウンドノイズを除去し、クリアなサウンドを実現。

しゃべるカゴログ



動画内で心音をご視聴いただけます ▶



HD

高解像度カラーディスプレイ

- 胎児心拍数が大きく表示され、広い視野角で見やすくなっています。
- カラー表示により高い視認性があります。また、暗い場所でも表示が確認できます。

実物大





トレース表示

- 表示切替により胎児心拍数の推移を波形表示し、搬送中にも確認できます。
- 分娩監視装置が使用できない場面でも簡便にご使用いただけます。



プローブ先端：φ30mm



プローブのプロテクト

- プローブホルダにプローブを収納すると先端を保護する構造です。



データ保存機能※

- トレース表示したデータを保存できます。



録音機能※

- 測定中の心拍音を録音することができます。

※データ保存を行う場合は市販のmicroSDカードをご用意ください。
(容量4GB以上を推奨)
※保存したトレース表示や、録音したデータはソニケイドでのみ再生
できます。

- microSDカード差し込み口は電池ボックス内にあります。



ポケットクリップ

- 電池カバーにはポケットクリップがついており、ポケットなどに挟んで持ち運びができます。



超音波胎児心音計ソニケイド

**SR2**

2MHz

(目安：妊娠10～40週)

SR3

3MHz

(目安：妊娠8～28週)

- サイズ：W75×D33×H140mm
- 重 量：約330g(プローブ・電池含む)
- 電 源：DC3V(1.5V単3形アルカリ乾電池 2本)(付属)
- 胎児心拍数(BPM)：(スタンダードモード)4拍の平均から算出
(スムーズモード)8拍の平均から算出
(マニュアルモード[手動])10拍の平均から算出
- プローブ：ウォータープルーフ(IPX7)
- 機 能：オートパワーオフ機能、15分アラーム機能、心音録音機能
- 付属品：超音波検査用ゲル(60g)、キャリーバッグ

注文コード*	品 番	規 格	標準価格
M80-000-20	SR2	2MHz(目安：妊娠10～40週)	¥198,000
M80-000-21	SR3	3MHz(目安：妊娠8～28週)	¥198,000



管理医療機器
特定保守管理医療機器
認証番号：302ADBZX00072000
販 売 名：胎児超音波心音計 ソニケイド

補充品：アクアソニック100ゲル

注文コード	品 番	容 量	標準価格
M00-000-05	01-02	60g	¥500

付属品：キャリーバッグ

ソニケイドを持ち運ぶ際にご使用ください。
超音波ゲル(約250g)も一緒に持ち運べます。



収納例



※超音波ゲル(約250g)は別売です。



ご使用方法等
詳細はコチラ!

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。